

Рекомендации по настройке триммерных аппаратов Reference A2 TR и Reference A2 TR (эконом)



Значения триммеров



H (НЧ) - Регулировка тембра в области низких частот



L (ВЧ) - Регулировка тембра в области высоких частот



P - Регулировка выходного уровня звукового давления



Установите регулятор громкости в среднее положение - между 2 и 3. Все триммеры находятся в крайнем правом положении, до упора по часовой стрелке.

1 шаг.

Определите разницу между потерей слуха по воздушной проводимости на 3000 Гц и 500 Гц и настройте **синий триммер H** соответственно. При повороте из крайнего правого в крайнее левое положение снижение усиления на 500 Гц относительно усиления на 3000 Гц меняется от 15 до 45 дБ.

2 шаг.

Настройте **красный триммер P** соответственно порогу дискомфорта пациента.

3 шаг.

При возникновении обратной связи - отрегулируйте **зеленый триммер L**.