

## Рекомендации по настройке триммерного аппарата Classica 3M



### Значения триммеров



**H** (НЧ) - Регулировка тембра в области низких частот



**S** - Переключатель типа частотной характеристики (N – нормальный и H – высокочастотный режим)



**P** – Регулировка выходного уровня звукового давления



Установите регулятор громкости в среднее положение - между 2 и 3. Триммер находится в крайнем правом положении (до упора по часовой стрелке), переключатель **S** в положении **N** (до упора против часовой стрелки).

1 шаг.

Определите разницу между потерей слуха по воздушной проводимости на 3000 Гц и 500 Гц и настройте **синий триммер H** соответственно. При повороте из крайнего правого в крайнее левое положение снижение усиления на 500 Гц относительно усиления на 3000 Гц меняется от 9 до 17 дБ.

2 шаг.

Настройте **коричневый триммер P** соответственно порогу дискомфорта пациента.

3 шаг.

Если усиление высоких частот недостаточно, переведите **переключатель S** в положение **H** для переключения аппарата в высокочастотный режим.