

## Рекомендации по настройке триммерных аппаратов Classica A02 и Classica A05



### Значения триммеров



**H (НЧ)** - Регулировка тембра в области низких частот



**L (ВЧ)** - Регулировка тембра в области высоких частот



**CR** - Регулировка коэффициента компрессии



Установите регулятор громкости в среднее положение - между 2 и 3. Все триммеры находятся в крайнем правом положении, до упора по часовой стрелке.

1 шаг.

Определите разницу между потерей слуха по воздушной проводимости на 3000 Гц и 500 Гц и настройте **синий триммер H** соответственно. При повороте из крайнего правого в крайнее левое положение снижение усиления на 500 Гц относительно усиления на 3000 Гц меняется от 14 до 23 дБ.

2 шаг.

Установите **желтый триммер CR** в среднее положение. В случае возникновения обратной связи или чрезмерного усиления тихих звуков (шум листьев, воды, вентилятора) поворачивайте триммер против часовой стрелки.

Для того, чтобы увеличить усиление тихих звуков, поворачивайте триммер по часовой стрелке.

3 шаг.

При возникновении обратной связи - отрегулируйте **зеленый триммер L**.