

## Рекомендации по настройке триммерных аппаратов Reference A3 TR



### Значения триммеров



**H** (НЧ) - Регулировка тембра в области низких частот



**AGC-0** (APУ по выходу)



**L** (ВЧ) - Регулировка тембра в области высоких частот

Установите регулятор громкости в среднее положение - между 2 и 3. Все триммеры находятся в крайнем левом положении, до упора по часовой стрелке.

1 шаг.

Определите разницу между потерей слуха по воздушной проводимости на 3000 Гц и 500 Гц и настройте **оранжевый триммер H** соответственно. При повороте из крайнего правого в крайнее левое положение снижение усиления на 500 Гц относительно усиления на 3000 Гц меняется от 0 до 32 дБ.

2 шаг.

Настройте **синий триммер AGC-0** соответственно порогу дискомфорта пациента.

3 шаг.

При возникновении обратной связи - отрегулируйте **белый триммер L**.