

# Рекомендации по настройке триммерных аппаратов Reference 22M TR (эконом) и Reference 22P TR (эконом)



## Значения триммеров



**H (НЧ)** - Регулировка тембра в области низких частот



**L (ВЧ)** - Регулировка тембра в области высоких частот



**AGC-I** (APУ по входу)



**AGC-0** (APУ по выходу)

Установите регулятор громкости в среднее положение - между 2 и 3. Все триммеры находятся в крайнем правом положении, до упора по часовой стрелке.

1 шаг.

Определите разницу между потерей слуха по воздушной проводимости на 3000 Гц и 500 Гц и настройте **синий триммер H** соответственно. При повороте из крайнего правого в крайнее левое положение снижение усиления на 500 Гц относительно усиления на 3000 Гц меняется от 3 до 32 дБ.

2 шаг.

**Красный триммер AGC-0** расположен в батарейном отсеке. Настройте **красный триммер AGC-0** соответственно порогу дискомфорта пациента.

3 шаг.

Установите **желтый триммер AGC-I** в среднее положение. В случае возникновения обратной связи или чрезмерного усиления тихих звуков (шум листьев, воды, вентилятора) поворачивайте триммер против часовой стрелки.

Для того, чтобы увеличить усиление тихих звуков, поворачивайте триммер по часовой стрелке.

4 шаг.

При возникновении обратной связи - отрегулируйте **зеленый триммер L**.